

CLIMA MC 15

HDL-C IMMUNO FS

Cat. No. 1 3521

Diff

Bi-Reagent

WL1	5 (578)
WL2	7 (670)
Units	0 (mg/dl)
Temperature	1 (37)
Std	*
Lin. Limit	180
Norm High	180
Norm Low	40
Decimals	0
Sample Vol	5
Reagent Vol	500
Delay	240
Reac. Time	300

*Diisi dengan nilai kalibrator dari value sheet sesuai lot Trucal U yang digunakan

Catatan:

1. Untuk informasi yang lebih rinci, silakan melihat petunjuk penggunaan reagen HDL-C Immuno FS.
2. Clima MC 15 adalah spektrofotometer semi otomatis; baca manual prosedur sebelum menggunakan.
3. Kualitas hasil pengukuran sangat dipengaruhi oleh kualifikasi pengguna (user).
4. Aplikasi ini telah diverifikasi oleh Proline dengan menggunakan reagen Proline.

Alat dan Bahan:

- Mikropipet
- Pipet tip
- Kuvet
- Reagen HDL
- Trucal Lipid
- Trulab Lipid Lvl 1
- Trulab Lipid Lvl 2
- Air suling

Prosedur Kalibrasi

- Masukkan ke dalam strip kuvet dengan menggunakan mikropipet :

No. Kuvet	Bahan	Reagen 1	Trucal Lipid
1	Blanko	400 μ L	-
2	Kalibrator	400 μ L	5 μ L

- Letakkan kuvet pada zona *mixing* dan tekan tombol MIX
- Pilih menu 4-UTILITIES, lalu pilih 3-CALIBRATE, lalu masukkan kode nomor **3** dan tekan READ
- Letakkan strip kuvet pada *reading zone* dan tekan READ
- Setelah pembacaan selesai, keluarkan kuvet dan tambahkan 100 μ L reagen 2 ke semua kuvet
- Letakkan kuvet pada zona *mixing* dan tekan tombol MIX
- Letakkan strip kuvet pada *reading zone* dan tekan READ

Prosedur Kontrol/ Sampel

- Masukkan ke dalam strip kuvet dengan menggunakan pipet :

No. Kuvet	Bahan	Reagen	Trulab Lipid/Sampel
1	Blanko	400 μ L	-
2	Kontrol/Sampel	400 μ L	5 μ L

- Letakkan kuvet pada zona *mixing* dan tekan tombol MIX
- Masukkan kode nomor **3** dan masukkan jumlah sampel serta posisi awal kuvet
- Setelah pembacaan selesai, keluarkan kuvet dan tambahkan 100 μ L reagen 2 ke semua kuvet
- Letakkan kuvet pada zona *mixing* dan tekan tombol MIX
- Letakkan strip kuvet pada *reading zone* dan tekan READ