



tes antigen nasal **mudah & nyaman**

Standar mutu tervalidasi dengan
tingkat kenyamanan yang lebih baik

**#INOVASI
INDONESIA**



15 Hasil dapat
dibaca dalam
menit

KEMENKES RI AKD 20303220133

34%
lebih murah*

DAPATKAN PROMO
LAUNCHING

HINGGA 14 APRIL 2022 (24.00 WIB)


* berlaku untuk pembelian via Shopee seluruh varian

* berlaku untuk pembelian via Tokopedia khusus varian

Family Bundling (2 x 5 tes/boks) atau **Regular Bundling** (2 x 25 tes/boks)


PANDUAN CARA PAKAI

1 Pengambilan Spesimen

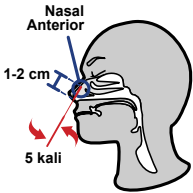


- Masukkan swab 1-2 cm
- Putar swab 5 kali selama total 10-15 detik
- Ulangi pada lubang hidung sisi lainnya

2 Ekstraksi Spesimen

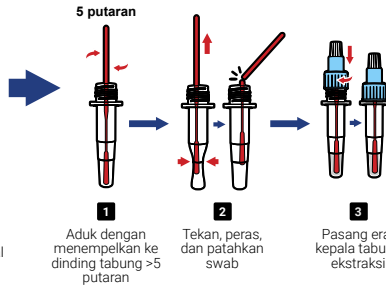

3 Pengerjaan Tes

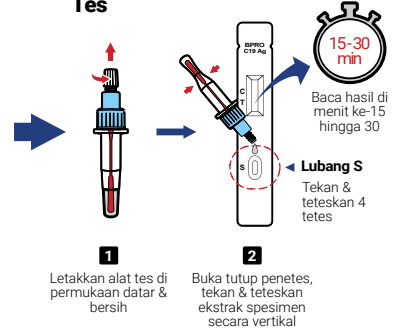

INFO PRODUK & PEMESANAN

Regular Pack
25 tes / boks

Simpan di suhu **2-30°C**

Kelengkapan Boks

- Alat tes cepat
- Buffer ekstraksi
- Swab nasal steril
- Petunjuk penggunaan
- Panduan cara pakai

Harga & Pemesanan

E-mail : marketing@prodis.co.id

Telp. / WhatsApp : 0856 0000 3557

Tokopedia : <https://www.tokopedia.com/prodisofficialstore>

Shopee : https://shopee.co.id/prodis_oficial_store

Informasi Produk

www.proline.co.id

Family Pack
5 tes / boks

Diproduksi oleh

ProLINE

PT PRODIA DIAGNOSTIC LINE

Kawasan Industri Jababeka III
Jl. Tekno 1 Blok C2 D-E-F, Cikarang, Jawa Barat, INDONESIA

SP702022.01-011.F



Certified Company
No. 01 05 10 20008

