

Proline^b TruLab Cystatin C Level 1

Informasi Kemasan

No. Katalog Isi per Kit
5 9870 99 10 046 3 x 1 mL

Tujuan Penggunaan

Bahan kontrol teruji untuk pemantauan performa tes dalam penentuan kuantitatif *cystatin C* secara in vitro.

Deskripsi

TruLab Cystatin C adalah bahan kontrol yang mengandung rekombinan *Cystatin C* dan pengawet biologis yang berasal dari sapi. Konsentrasi *Cystatin C* dalam TruLab Cystatin C Level 1 pada kisaran normal.

Penyimpanan

Sebelum dan sesudah dibuka, botol TruLab Cystatin C harus disimpan pada suhu 2 – 8 °C.

Stabilitas

Sebelum dibuka: hingga akhir bulan kedaluwarsa

Sesudah dibuka: maksimal 12 minggu

Penyimpanan dan penanganan produk yang tepat harus diperhatikan.

Peringatan dan Tindakan Pencegahan

1. Mengandung natrium azida (0,95 g/L) sebagai bahan pengawet. Hindari kontak dengan kulit dan membran mukosa.
2. TruLab Cystatin C mengandung bahan hewani. Serum kontrol harus ditangani seperti bahan infeksius dengan penanganan yang sama terhadap spesimen pasien.
3. Lihat lembar data keselamatan dan ambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk penggunaan kalibrator dan kontrol.
4. Hanya untuk penggunaan profesional.

Persiapan

TruLab Cystatin C berbentuk cairan dan siap untuk digunakan.

Prosedur Kerja

Silakan lihat petunjuk penggunaan reagen untuk penggunaan kontrol.

Nilai Uji

Nilai uji untuk analit ditentukan menggunakan reagen Cystatin C yang dikalibrasi dengan TruCal Cystatin C. Nilai uji mungkin sedikit berbeda dengan adanya perbedaan reagen dan metode yang digunakan. Nilai uji yang dilampirkan khusus untuk nomor lot produk tercantum.

Penanganan Limbah

Lihat aturan lokal yang berlaku.

Pustaka

1. Röhle G, Siekmann L. *Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393–1401.*
2. *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395).*



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim
Germany

Dikemas ulang dan didistribusikan oleh:

PT Prodia Diagnostic Line
Kawasan Industri Jababeka III
Jl. Tekno 1 Blok C 2 D-E-F
Cikarang, Jawa Barat 17530 - Indonesia

	No. Lot	Kedaluwarsa	Nilai uji	Rentang
TruLab Cystatin C Level 1	31227	2023-10-15	0,920 mg/L	0,782 – 1,06 mg/L