

# Proline<sup>b</sup> TruCal CRP hs

## Informasi Kemasan

No. Katalog                      Isi per Kit  
1 7080 99 10 059                      5 x 1 mL

## Tujuan Penggunaan

Kalibrator digunakan untuk pemeriksaan in vitro secara kuantitatif terhadap *C-reactive protein* (CRP) pada sistem fotometrik.

## Deskripsi

TruCal CRP hs merupakan set yang terdiri dari lima kalibrator cair dengan tingkatan berbeda. TruCal CRP hs dibuat berdasarkan serum manusia. Set ini digunakan dengan reagen CRP-u hs dan melindungi kisaran sensitive yang tinggi.

## Penyimpanan

Sebelum dan sesudah dibuka, TruCal CRP hs disimpan pada 2 – 8 °C.

## Stabilitas

Sebelum dibuka:            hingga akhir bulan kedaluwarsa

Setelah dibuka:            maksimal 3 bulan

Penyimpanan dan penanganan produk yang tepat harus diperhatikan.

## Peringatan dan Tindakan Pencegahan

1. Darah donor yang digunakan untuk memproduksi TruCal CRP ditemukan non-reaktif ketika diuji dengan metode yang disetujui untuk HBsAg, anti-HIV 1 + 2 dan anti-HCV. Namun tidak ada pemastian bahwa komponen produk yang berasal dari serum manusia akan bebas dari agen infeksi, maka dianjurkan untuk menangani kontrol dengan tindakan yang sama seperti spesimen pasien.
2. Mengandung sodium azida (0,95 g/L) sebagai bahan pengawet. Jangan tertelan! Hindari kontak dengan kulit dan membran mukosa.
3. Lihat lembar data keselamatan dan ambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk penggunaan kalibrator dan kontrol.
4. Hanya untuk penggunaan profesional.

## Persiapan Reagen

TruCal CRP hs berbentuk cairan dan siap untuk digunakan.

## Nilai uji kalibrator

Nilai uji TruLab CRP ditentukan oleh kalibrasi dengan bahan referensi ERM<sup>®</sup>DA474/IFCC sesuai dengan protokol yang telah ada. Nilai kalibrator yang dilampirkan khusus untuk nomor lot peroduk ini.

## Penanganan Limbah

Lihat aturan lokal yang berlaku.

## Pustaka

1. *Stenman UH. Standardization of immuoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997.p.243-68.*
2. *Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1<sup>st</sup> ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998.p. 1393-1401.*
3. *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Departement of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395)*



DiaSys Diagnostic Systems GmbH  
Alte Strasse 9 65558 Holzheim  
Germany

## Dikemas ulang dan didistribusikan oleh:

PT Prodia Diagnostic Line  
Kawasan Industri Jababeka III  
Jl. Tekno 1 Blok C 2 D-E-F  
Cikarang, Jawa Barat 17530 - Indonesia

	No. Lot	Kedaluwarsa	Nilai Kalibrator
TruCal CRP hs Level 1	34491	2025-03-30	0,050 mg/dL
			0,500 mg/L
TruCal CRP hs Level 2	34492	2025-03-30	0,245 mg/dL
			2,450 mg/L
TruCal CRP hs Level 3	34493	2025-03-30	0,845 mg/dL
			8,45 mg/L
TruCal CRP hs Level 4	34494	2025-03-30	1,245 mg/dL
			12,45 mg/L
TruCal CRP hs Level 5	34495	2025-03-30	2,045 mg/dL
			20,45 mg/L